


ПРИМЕНЕНИЕ 1/3 SOFT



ОКРАШИВАНИЕ КРАЕВОЙ ДЕСНЫ ЦВЕТОМ 53. БАЗИС: ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ 34.

При мягкой индивидуализации SOFT окрашивают только краевую десну. Эта тонкая полоска шириной 1-2 мм представляет собой участок, который сразу виден у пациента при незначительном подъеме уголков рта. Краевая десна проходит соответственно контуру шеек зуба в форме гирлянды, у нее гладкая поверхность и светло-розовый цвет. Для воссоздания краевой десны используют исключительно полимер цвета 53. Необходимо учесть тот факт, что должен быть плавный переход между краевой десной и базисным материалом цвета 34.


ПРИМЕНЕНИЕ 2/3 MEDIUM

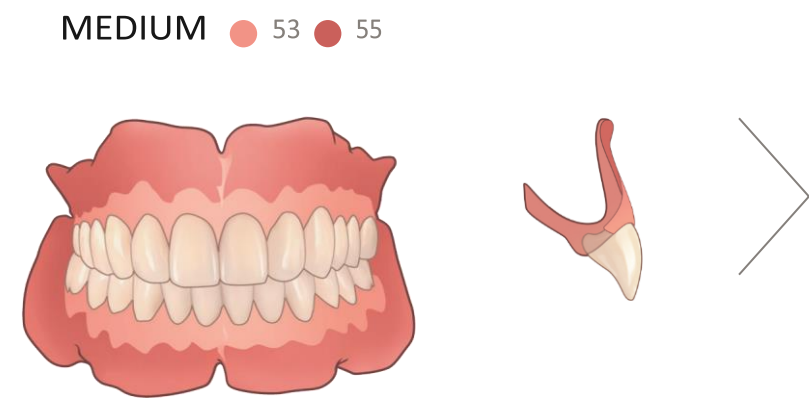

ОКРАШИВАНИЕ ПРИКРЕПЛЕННОЙ ДЕСНЫ ЦВЕТОМ 53 И 55. БАЗИС: ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ 34.

Индивидуализация MEDIUM является расширенным вариантом индивидуализации SOFT, при котором дополнительно окрашивают прикрепленную десну. Данную схему индивидуализации используют при высокой линии улыбки. Прикрепленная десна представляет собой полосу шириной 3-9 мм, слизистая в этом месте неподвижно и прочно соединена с надкостницей. Этот участок достаточно тонкий и с незначительным кровоснабжением. Кроме того, следует отметить, что у разных людей в этой области может наблюдаться различно выраженный эффект апельсиновой корки. Для окрашивания прикрепленной десны используют полимер цвета 55.

ПРИМЕНЕНИЕ 3/3 STRONG

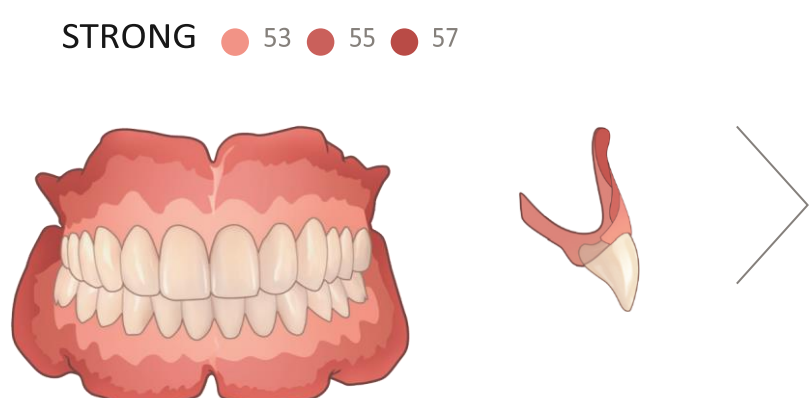

ОКРАШИВАНИЕ ЦВЕТАМИ 53, 55 И 57 ДЛЯ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ СЛИЗИСТОЙ. БАЗИС: ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ 34.

При индивидуализации STRONG дополнительно к индивидуализации MEDIUM окрашивают слизистую оболочку альвеолярного отростка. Данная схема используется у пациентов с десневой улыбкой. Границу между прикрепленной десной и слизистой альвеолярного отростка распознают по изменению цвета слизистой от светло-розового к темно-розовому. Для нас, зубных техников, важно цветовое разграничение, связанное с большим количеством кровеносных сосудов. Для данного вида окрашивания мы используем цвет 57.

SOFT ● 53



Индивидуализация краевой десны цветом 53.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

MEDIUM ● 53 ● 55



Индивидуализация цветом 53, дополнительно
для прикрепленной десны цвет 55.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

STRONG ● 53 ● 55 ● 57



Индивидуализация цветами 53, 55 и 57
для альвеолярной слизистой.
Базис – оригинальный розовый цвет 34.

INDIVIDUAL ● 53 ● 55 ● 57
+ Intensive Colors



Индивидуализация цветами 53, 55 и 57, а также
пигментами (Intensive Colors). Базис –
оригинальный розовый цвет 34.